

爱尔创·魅影

全 | 锆 | 义 | 齿



魅影·美学型

颜色精准 高效美学


Reliable Materials Expert

 爱尔创



## 魅影-美学型

颜色精准 高效美学

- 预染色，透性强度兼顾
- 透性自然渐变，操作简单，稳定高效
- 美学效果更接近自然牙，前牙优选

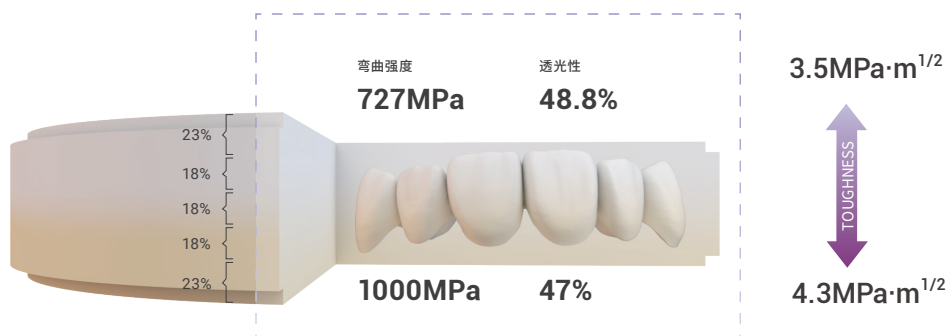

## 产品规格

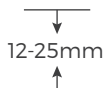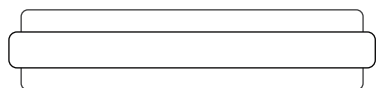

D98X12 D98X14 D98X16 D98X18  
D98X20 D98X22 D98X25

A1 A2 A3 A3.5 A4  
B1 B2 B3 B4  
C1 C2 C3 C4  
D2 D3 D4  
BL1 BL2 BL3 BL4

## 上釉推荐-写实派釉膏

- 色彩丰富、均匀
- 颗粒细腻、操作简单
- 低温烧制、应用广泛
- 自主研发，工艺稳定



### 基础色



### 切端色



### 窝沟色



### 调整色



### 牙龈色




### 透明色



排版推荐

根据修复体高度选择合适瓷块高度

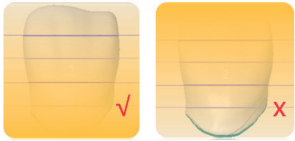

打磨工具推荐

高效的打磨切削力 / 产热少 / 防崩边

- 超细颗粒
- 8000-15000rpm  
max:25000rpm
- 1pc

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
| 编码     | UPTF 10                                                                           | UPTF 02                                                                           | UPTF 03                                                                           |
| 尺寸：φmm | 13                                                                                | 5                                                                                 | 4.5                                                                               |
| 长度：mm  | 2.0                                                                               | 13.0                                                                              | 13                                                                                |

操作简单 / 高度抛光 / 过程无不良气味

- 中度
- 7000-15000rpm  
max:20000rpm
- 1pc


|       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |  |  |
| 编码    | UPHG 07M                                                                            | UPHG 06M                                                                            | UPHG 03M                                                                            | UPHG 10M                                                                             |
| 尺寸：mm | 26*2                                                                                | 20*1                                                                                | 4*13                                                                                | 12*2                                                                                 |

- 中度
- 7000-15000rpm  
max:20000rpm
- 1pc

|       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |  |  |
| 编码    | UPHG 07F                                                                            | UPHG 06F                                                                            | UPHG 03F                                                                            | UPHG 10F                                                                             |
| 尺寸：mm | 26*2                                                                                | 20*1                                                                                | 4*13                                                                                | 12*2                                                                                 |

## | 烧结曲线 |

魅影美学型理想烧结温度是1480℃，保温2小时。

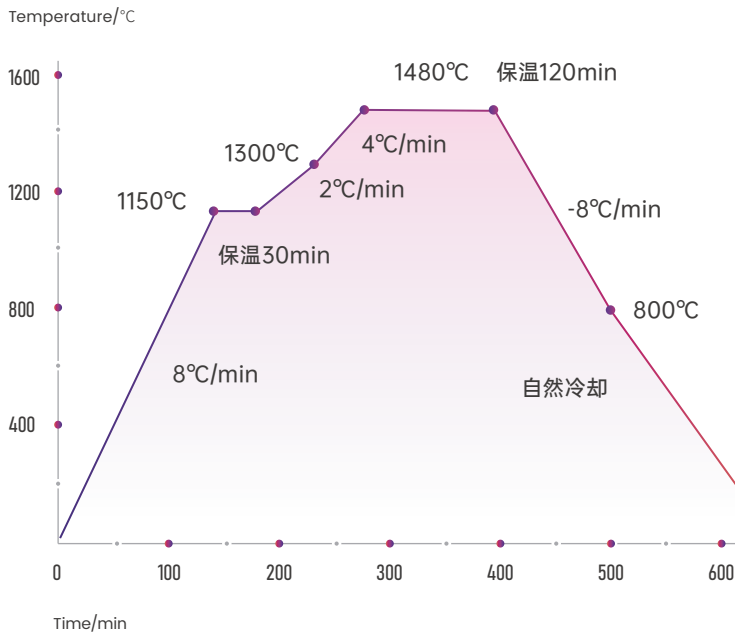

| 程序  | 温度 (°C) | 升温速率 (°C/min) | 保温时间 (min) |
|-----|---------|---------------|------------|
| 第1段 | 1150    | 8             | 30         |
| 第2段 | 1300    | 2             | 0          |
| 第3段 | 1480    | 4             | 120        |
| 第4段 | 800     | -8            | 0          |

| 程序  | 开始温度 (°C) | 结束温度 (°C) | 时间 (min) |
|-----|-----------|-----------|----------|
| 第1段 | 室温        | 1150      | 141      |
| 第2段 | 1150      | 1150      | 30       |
| 第3段 | 1150      | 1300      | 75       |
| 第4段 | 1300      | 1480      | 45       |
| 第5段 | 1480      | 1480      | 120      |
| 第6段 | 1480      | 800       | 85       |
| 第7段 | 800       | 100       | 自然冷却     |

备注：烧结温度为炉内烧结牙冠位置实际温度，烧结时可根据烧结炉实际情况和烧结颗数调整程序、烧结温度，详情咨询我司技术支持人员。

国瓷材料 股票代码: 300285



深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: [services@upcera.com](mailto:services@upcera.com)

网址: [www.upcera.com](http://www.upcera.com)

Copyright©Upcera No.2026 Rev.01

资料仅供专业人士及内部交流使用 \*禁忌内容或注意事项详见产品说明书



官方公众号