

爱尔创·瓷倍健

全 | 瓷 | 义 | 齿



ST-Color

预染高效

超透氧化锆修复材料

RELIABLE MATERIALS EXPERT


Reliable Materials Expert

 爱尔创

ST-Color

预染高效 全冠连桥

- 预染色
- 操作简单
- 稳定高效
- 适用于全锆全口长桥

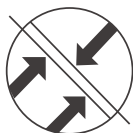


>1100 MPa

三点弯曲强度

烧结曲线

ST-Color 理想烧结温度是1530°C，保温2小时。

Temperature/°C

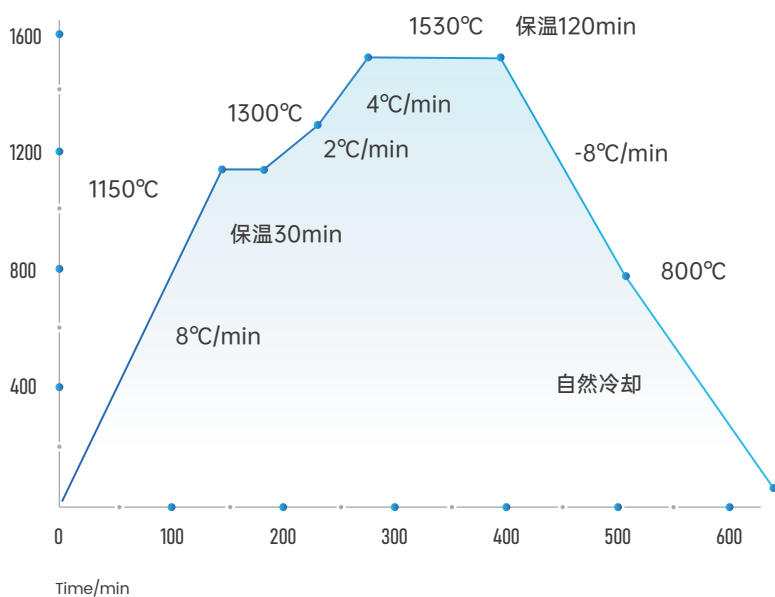


程序	温度 (°C)	升温速率 (°C/min)	保温时间 (min)
第1段	1150	8	30
第2段	1300	2	0
第3段	1530	4	120
第4段	800	-8	0

程序	开始温度 (°C)	结束温度 (°C)	时间 (min)
第1段	室温	1150	141.3
第2段	1150	1150	30
第3段	1150	1300	75
第4段	1300	1530	57.5
第5段	1530	1530	120
第6段	1530	800	91.25
第7段	800	100	自然冷却

备注：烧结温度为炉内烧结牙冠位置实际温度，烧结时可根据烧结炉实际情况和烧结颗数调整程序、烧结温度，详情咨询我司技术支持人员。

| 适用工艺 |

全锆牙-内、外染色工艺 烤瓷牙-饰瓷、微饰瓷工艺

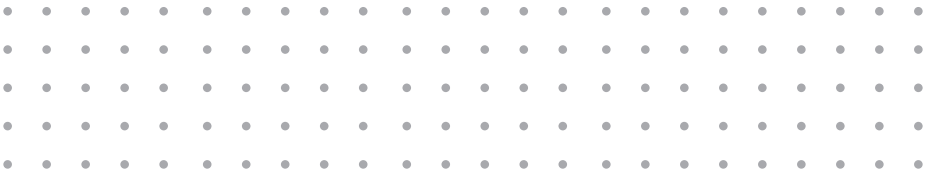

打磨工具推荐

高效的打磨切削力 / 产热少 / 防崩边

-  细颗粒
-  8000-15000rpm
max:25000rpm
-  1pc

编码	UPTG 01	UPTG 02	UPTG 03
尺寸: mm	6.5	5	4.5
长度: mm	13.0	13.0	13.0

操作简单 / 高度抛光 / 过程无不良气味

-  中度
-  7000-15000rpm
max:20000rpm
-  1pc

编码	UPHG 07M	UPHG 06M	UPHG 03M	UPHG 10M
尺寸: mm	26*2	20*1	4*13	12*2

-  精细
-  7000-15000rpm
max:20000rpm
-  1pc

编码	UPHG 07F	UPHG 06F	UPHG 03F	UPHG 10F
尺寸: mm	26*2	20*1	4*13	12*2

国瓷材料 股票代码: 300285



深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: services@upcera.com

网址: www.upcera.com

Copyright©Upcera No.2026 Rev.01

资料仅供专业人士及内部交流使用 *禁忌内容或注意事项详见产品说明书



官方公众号